



Innovation

Känn
frihets känslan!

DIVEEN®

Intravaginalt hjälpmedel som reducerar
ansträngningsinkontinens.¹

Gör vardagen **enklare**...

Miljontals kvinnor runt om i världen lider av ansträngningsinkontinens. I ett land som Frankrike drabbar detta över 3 miljoner kvinnor.

Har du varit orolig för att skratta, gå på fest eller att delta i sportaktiviteter?

Urinläckage kan påverka dig i din vardag och hindra dig att göra de saker du helst vill göra.²

Låt det inte tynga ner dig,
välj Diveen®, det diskreta skyddet!



Kliniskt bevisad **effektiv** behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor.³

☀ Diveen® reducerar frekvensen av urinläckage med i genomsnitt 69%³

☀ Diveen® förbättrar signifikant patientens upplevelser när det gäller symptom:
Poäng för tillfredsställelse 78/100 för de patienter som använde Diveen*

☀ Diveen förbättrar patientens emotionella välmående³

* jämfört med poäng för tillfredsställelse 5/100 hos dem som inte använde Diveen³

Vad är Diveen® ?

Diveen® är ett intravaginalt hjälpmedel indikerat för kvinnor med urinläckage, speciellt ansträngningsinkontinens.

Lika enkelt att använda som en tampong!

Varför Diveen®?

Diskret, effektiv och enkel att använda³
Diveen® följer dig, vart du än går



Innovativt och patenterat koncept¹

Diveen® är designad för att supportera slidväggen i området under blåshalsen. Vid ansträngningar så som hostning, lägger vikten från blåsan tryck på den flexibla ringen på Diveen® så att den styva delen rör sig och stänger till urinröret och betydligt reducerar risken för urinläckage³

Varför använda Diveen® ?

- En unik mekanism som möjliggör signifikant reduktion av risken för urinläckage.¹
- 100% diskret skydd
- Biokompatibelt material.¹
- 12 timmars inkontinenskontroll som gör det möjligt att delta i fysiska aktiviteter.
- Enkel att använda liknande en tampong. Du behöver inte ta bort Diveen® under dagen, inte ens när du ska på toaletten.
- Kan sättas in utan att använda applikatorn.



www.bbraun.com/diveen

(1) Brevet EP 1 924 218 B1

(2) Haab F. et al. Traitement de l'incontinence urinaire d'effort par colposuspension percutanée: une technique non satisfaisante. Progrès en Urologie 2001, 11:336-339

(3) Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized control trial. International Urogynecology Journal 2012, 23 (12): 1727-34


Hur du använder Diveen® i några enkla steg*

1. Före användning av Diveen®

- Tvätta händerna noggrant.
- Hitta en komfortabel ställning.

2. Förberedelse av Diveen®

- Kläm försiktigt ihop den flexibla ringen och för in den i applikatorhylsan.
- Sätt tillbaka pushern i applikatorhylsan för att göra klart för införsel.

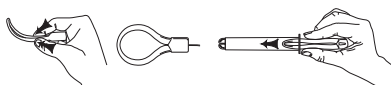

3. Införsel av Diveen®

- För in applikatorhylsan i vaginan.
- Tryck in ringen vidare med hjälp av pushern (på samma sätt som när man applicerar en tampong med applikator).



4. Borttagning av Diveen®

- Dra försiktigt i utdragstråden för att ta ut ringen från vaginan.



*Läs bruksanvisningen noggrant före användning.
Konsultera din doktor för råd för behandling av din inkontinens.



Artikelnr.	Storlek	Antal/box
3132NO	Small	5 stycken +1 applikator
3133NO	Medium	5 stycken +1 applikator
3022NO	Small	15 stycken +1 applikator
3023NO	Medium	15 stycken +1 applikator

This document, its contents, including institutional data, information, trademarks and logos mentioned herein are the exclusive property of B. Braun.
Any representation and / or reproduction, total or partial, of this document and its contents without the express prior consent of B. Braun, is strictly prohibited and constitutes an infringement of the intellectual property rights of B. Braun.
Non binding documents and photographs.
For healthcare professional use only. Please read carefully the instructions for use.



B. BRAUN Medical AB
Svärdvägen 21, 182 12 Danderyd
+46 (0)8 634 34 00

CE 0123