



# Trio Silex förstärkningshäfta bruksanvisning


- 01** Rengör huden med vatten och säkerställ att huden är torr. (Observera att häftan inte fäster på fuktig hud)

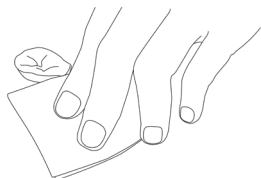


- 02** Dra bort de båda genomskinliga flikarna på ena sidan häftan märkta med 1.

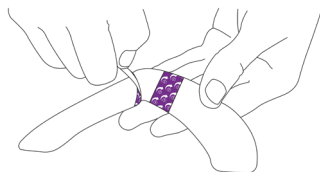

- 03** Placera häftan så att den överlappar stomiplattans kant och huden.

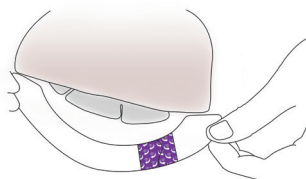

- 04** Dra bort de båda flikarna på häftan märkta med 2 och massera lätt så att den sitter på plats.

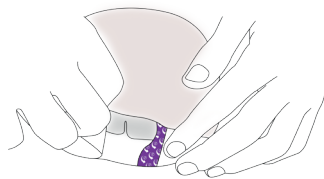

Trio Silex® - förstärkningshäfta av mjuk silikon

- Maximal flexibilitet – ökad rörelsefrihet
- Ultratunn, likt en andra hud, med omedelbar vidhäftning
- Vattenbeständig, absorberar inte, perfekt för bad och simning
- Låter huden andas, minskad risk för hudskador
- Avlägsnas i ett enda stycke utan att lämna rester på huden

Beställ GRATIS prov på [www.capero.se](http://www.capero.se)  
via e-post: [info@capero.se](mailto:info@capero.se)  
eller på telefon **040-41 07 13**



Se gärna instruktionsvideon för Trio Silex® som finns på [www.capero.se](http://www.capero.se).