


# Trio Silken silikongel bruksanvisning


- 01** För att öppna tuben, skruva av korken. Punktera folien med korkens spetsiga ände.



- 02** Rengör huden med vatten och säkerställ att huden är torr.

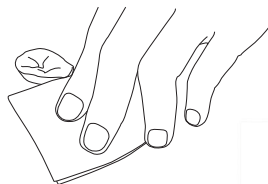

- 03** Applicera gelen direkt i det ojämna området runt stomin, eller där det behövs. För bästa resultat, sprid inte ut gelen.

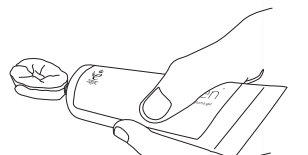

- 04** Applicera stomibandaget över gelen och låt den sprida ut sig själv under bandaget. Gelen härdar under bandaget och anpassar sig till ojämnheter och hudens veck.



Trio Silken® - mjuk och följsam silikongel:

- Fyller ut hudveck och ojämna områden runt stomin
- Sviker inte vid applicering
- Låter huden andas
- Avlägsnas i sin helhet – lämnar inga rester\*
- Förblir mjuk och flexibel för din komfort

Beställ GRATIS prov på [www.capero.se](http://www.capero.se)  
via e-post: [info@capero.se](mailto:info@capero.se)  
eller på telefon **040-41 07 13**



\*när den har härdat

Se gärna instruktionsvideon för Trio Silken® silikongel som finns på [www.capero.se](http://www.capero.se).