




01 Ta ut blistret innehållande Trio Siltac® från kartongen, skala av locket från blistret.

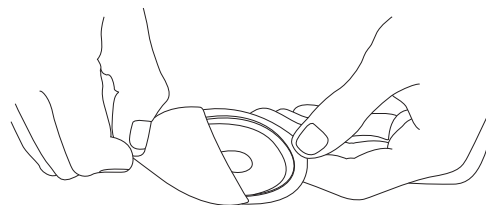


02 Håll i blistrets flik med en hand, och använd tummen på din andra hand till att skala av Trio Siltac® in mot mitten av blistret.

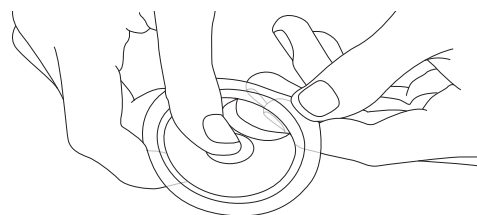


03 Använd tummen och pekfinger till att försiktigt men bestämt dra ut Trio Siltac® ur blistret. Det är normalt att den sitter fast i blistret, men är stark nog att hålla för att dras ut från blistret.

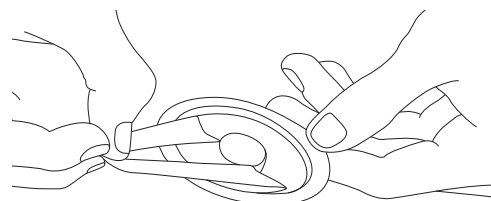


04 Det är viktigt att huden är torr innan man applicerar Trio Siltac® på huden. Den fäster inte på fuktig hud. Ta tag i båda ändarna, sträck ut den över stomin. Den sträcker ut sig och har en mycket god vidhäftningsförmåga för att forma ett säkert skydd runt stomin.

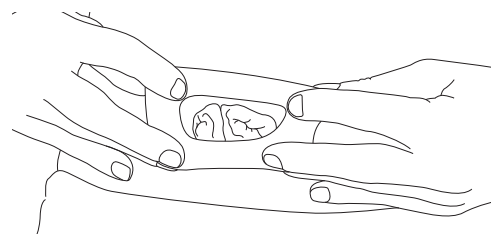

05 Låt Trio Siltac® dra ihop sig och krama runt stomin. Den är gjord för att passa runt alla former på stomi, så det finns ingen anledning att forma den, den formar sig själv runt stomin.

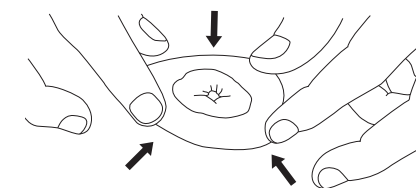

06 När Trio Siltac® har format sig runt stomin, tryck fast den på huden. Nu kan du applicera ditt stomibandage som vanligt.

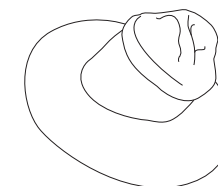

OBSERVERA: Trio Siltac® finns i tre storlekar, det är viktigt att välja rätt storlek för perfekt passform. Vid avlägsnande kommer normalt Trio Siltac att följa med när stomibandaget dras bort, annars avlägsnas den i ett enda stycke utan att lämna rester kvar på huden.