



Trio Silvex bruksanvisning


01 Ta ut blistret innehållande Trio Silvex® från kartongen, skala av locket från blistret.

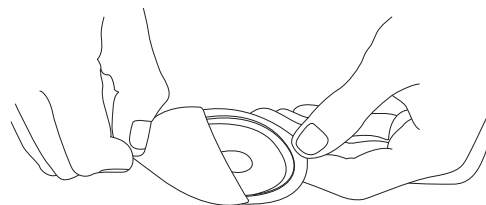


02 Håll i blistrets flik med en hand, och använd tummen på din andra hand till att skala av Trio Silvex® in mot mitten av blistret.

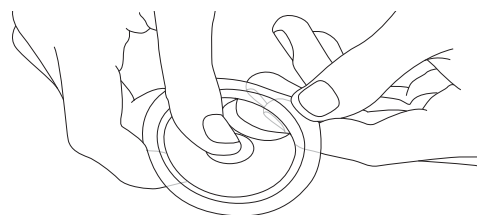


03 Använd tummen och pekfinger till att försiktigt men bestämt dra ut Trio Silvex® ur blistret. Det är normalt att den sitter fast i blistret, men är stark nog att hålla för att dras ut från blistret.

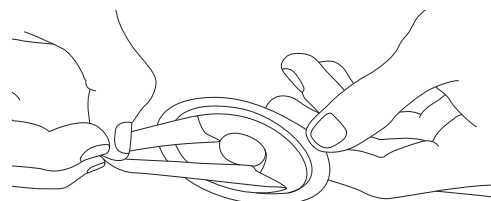


04 Det är viktigt att huden är torr innan man applicerar Trio Silvex® på huden. Den fäster inte på fuktig hud. Ta tag i båda ändarna, sträck ut den över stomin. Den sträcker ut sig och har en mycket god vidhäftningsförmåga för att forma ett säkert skydd runt stomin.

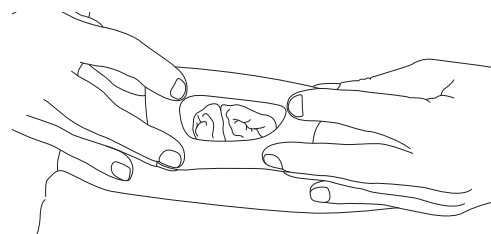

05 Låt Trio Silvex® dra ihop sig och krama runt stomin. Den är gjord för att passa runt alla former på stomi, så det finns ingen anledning att forma den, den formar sig själv runt stomin.

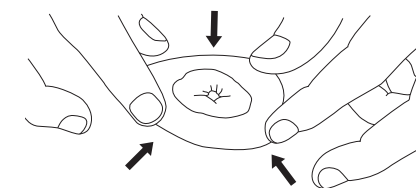

06 När Trio Silvex® har format sig runt stomin, tryck fast den på huden. Nu kan du applicera ditt stomibandage som vanligt.

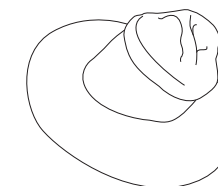

OBSERVERA: Trio Silvex® finns i två storlekar, det är viktigt att välja rätt storlek för perfekt passform. Vid avlägsnande kommer normalt Trio Silvex att följa med när stomibandaget dras bort, annars avlägsnas den i ett enda stycke utan att lämna rester kvar på huden.