



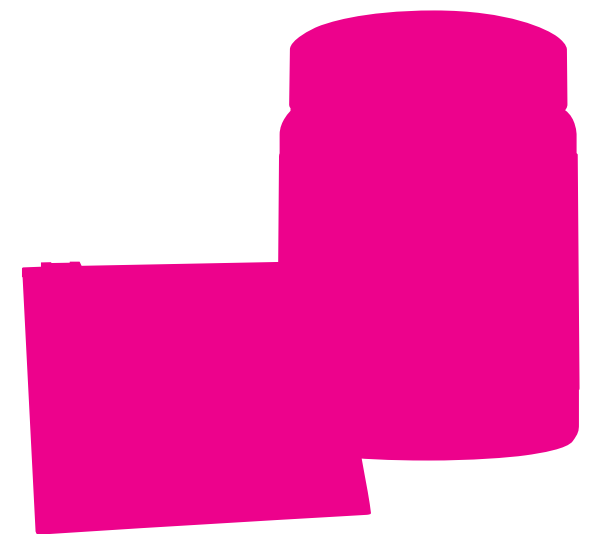

Bruksanvisning:

Rekommenderas vid tömningsbar påse
(dock ej urostomipåse).

1. Stäng änden på stomipåsen
2. Lägg HELA portionspåsen i din stomipåse –
öppna INTE portionspåsen

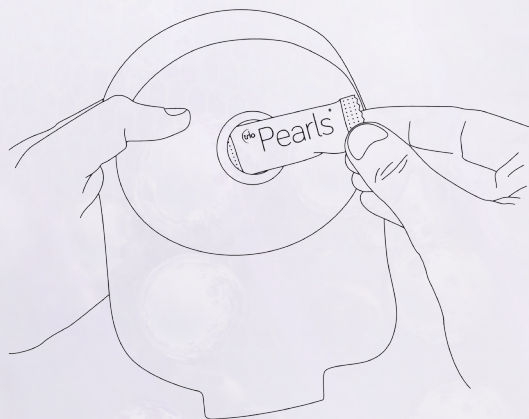

3. Vid tömning lägger du i en ny portionspåse
från änden av påsen



Beställ **GRATIS PROVER** på www.capero.se

Beställningsinformation

Trio Pearls® 100 st	Artikelnr TR205	Varunr 73 66 40
------------------------	--------------------	--------------------



Ingår i högkostnadsskyddet!

Beställ **GRATIS PROVER** från:

CAPERO MEDICAL AB
Furugatan 14
234 41 LOMMA

040-41 07 13
info@capero.se

Besök oss gärna på Facebook!

capero.se

TrioOstomyCare.com

Follow us on



@TrioOstomyCare



Trio Ostomy Care

trusted results in ostomy

trio ostomy care™



trio Pearls®

Superabsorberande, lukt
– och gasreducerande portionspåsar

den enda färglösa produkten med
aktiv luktkontroll

trusted results in ostomy

M0074

Trio Pearls®

Trio Pearls® är en superabsorberande gelbildande portionspåse som aktivt absorberar lukt. För dig med tunnflytande innehåll i din påse som vill få bättre kontroll över din stomi och din vardag. Tunnflytande innehåll kan vara genant eller besvärligt, med läckage, lukt och "skvalpande" påse. Kanske väljer du att avstå från aktiviteter om du inte har tillgång till toalett under lång tid.

Traditionella gelbildande produkter kan absorbera vätska men inte ta hand om lukt och gas.

Trio Pearls® innehåller Nano-Active-teknologin som aktivt absorberar luktmolekyler istället för att fånga dem i en gel. Trio Pearls® erbjuder även kontroll genom att bilda gel i din påse. Gelen är lite tjockare vilket gör att den kan förhindra läckage, bevara filtret och göra din påse plattare och mer diskret.

“Trio Pearls® missfärgar inte toaletten och jag noterade att det inte luktar så mycket vid tömning...”

Chris Jackson



Fördelar:

- aktiv lukt-/gasabsorbering
- märkbar reduktion av doft även vid tömning
- missfärgar inte kläder eller toalett
- minskat läckage
- bevarar filtret
- diskretare påse
- enklare och renare tömningar
- ökad säkerhet & komfort
- mindre "skvalp"

Perfekt för:

- daglig användning för ökad komfort
- nattlig användning för en god natts sömn
- långa resor och på semestern
- sociala evenemang, fester, restaurangbesök mm

Nano-Active-teknologi

Aktiv luktkontroll



Nedbrytning av mat producerar odörmolekyler och gaser.

Trio Pearls® innehåller en superabsorbent som aktivt absorberar luktmolekyler istället för att fånga dem i en gel.

Fig 1. Hur fungerar NanoActive?


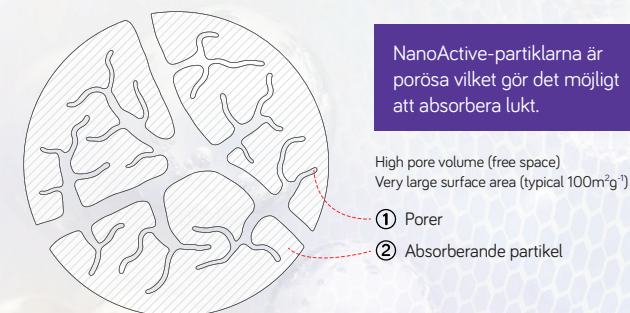



Fig 2. **Absorption** – skillnaden med luktkontroll mellan Trio Pearls® och andra gelbildande produkter.

Trio Pearls®

Annan produkt

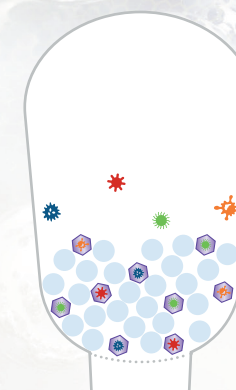

Absorberar lukt, du kan känna skillnaden även vid tömning

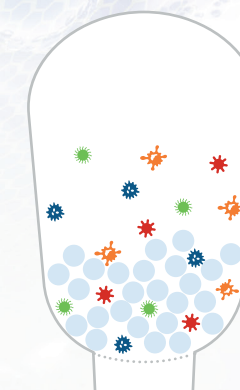

Fångar lukt i gelen istället för att absorbera den

Hexagon - NanoActive-teknologi

Stjärnor - Odörpartiklar